



## DIŐ ÜNİTİ İÇİN YERLEŐİM BİLGİSİ

Teknik servis tarafından verilen yerleŐim dökümanı ekinde cihazın boyut ölçüleri ve dađıtım kutusu ayrıntısı verilmiŐtir. DiŐ ünitenin altında toplanacak olan boru ve kablo bileŐenleri 15 cm x 20 cm alanın dıŐına taŐırılmayacaktır. Tesisat yapılırken teslim edilen dökümandaki açıklamaların dikkate alınması gereklidir.

- Rahat bir çalıŐma alanı oluŐturmak açosından

\* KreŐuar tarafı için; ünit boyut ölçülerinin gösterildiđi dökümanda belirtilen 'A' noktasından (dađıtım kutusu) itibaren dolap yoksa duvar, varsa dolap arası 130 cm,

\* Tetiyer tarafı için; cihazın yatmıŐ (trendelenburg) hali göz önünde bulundurulduđunda dolap yoksa duvar, varsa dolap arası 150 cm,

\* Ayak tarafı için; ünit boyut ölçülerinin gösterildiđi dökümanda belirtilen 'A' noktasından (dađıtım kutusu) itibaren dolap yoksa duvar, varsa dolap arası 130 cm mesafe bırakılması önerilir.

\* Teslim edilen dökümanın üniti dađıtım kutusu ekinde belirtildiđi Őekilde 1/2 parmak plastik boruyla su getirilecek ve ucuna 1/2 parmak maŐon takılacak.



## **CASTELLINI MARKA DUVARA MONTE PERIAPICAL RONTGEN CİHAZI İÇİN YERLEŞİM BİLGİSİ**

Periapical röntgen cihazının konumlandırılacağı duvar perde beton veya kolon olmalıdır. Röntgen cihazı tamamen açıldığında duvara 180 – 200 kg yük uyguladığından riskleri ortadan kaldırmak için montajın yapılacağı noktanın sağlamlığı önem arz etmektedir. Duvar montaj için uygun değilse uygun hale getirmek için metal konstrüksiyon yaptırılması gerekmektedir.

Bu konuda teknik servise danışılmalıdır.

## **DURR MARKA CERRAHİ ASPİRATÖR CİHAZI İÇİN YERLEŞİM BİLGİSİ**

Teslim edilen dökümanın ünit dağıtım kutusu ekinde belirtildiği şekilde,

- Cerrahi aspiratörün konumlandırılacağı noktadan dış ünitenin altındaki dağıtım kutusuna,

\* tetikleme için 3 x 1,5 TTR kablo,

\* emiş için 40'lık PVC pimaş getirilmesi gerekmektedir. Birden fazla dış üniti varsa yakın noktaya kadar tek getirilip uygun yerden ünitlere dağıtım yapılabilir.


\* Cerrahi aspiratörün konumlandırılacağı noktada 220V elektrik prizi olacak.

## **DURR MARKA KOMPRESÖR CİHAZI İÇİN YERLEŞİM BİLGİSİ**

Teslim edilen dökümanın ünit dağıtım kutusu ekinde belirtildiği şekilde

- Kompresörün konumlandırılacağı noktadan dış ünitenin altındaki dağıtım kutusuna 1/2 parmak plastik boruyla hava getirilecek ve ucuna 1/2 parmak maşon takılacak. Birden fazla dış üniti varsa yakın noktaya kadar tek getirilip uygun yerden ünitlere dağıtım yapılabilir.

# ! DİKKAT ! : AŐAĐIDAKİ ŐEMANIN ÖLÇÜLERİ 1:1 DEĐİLDİR

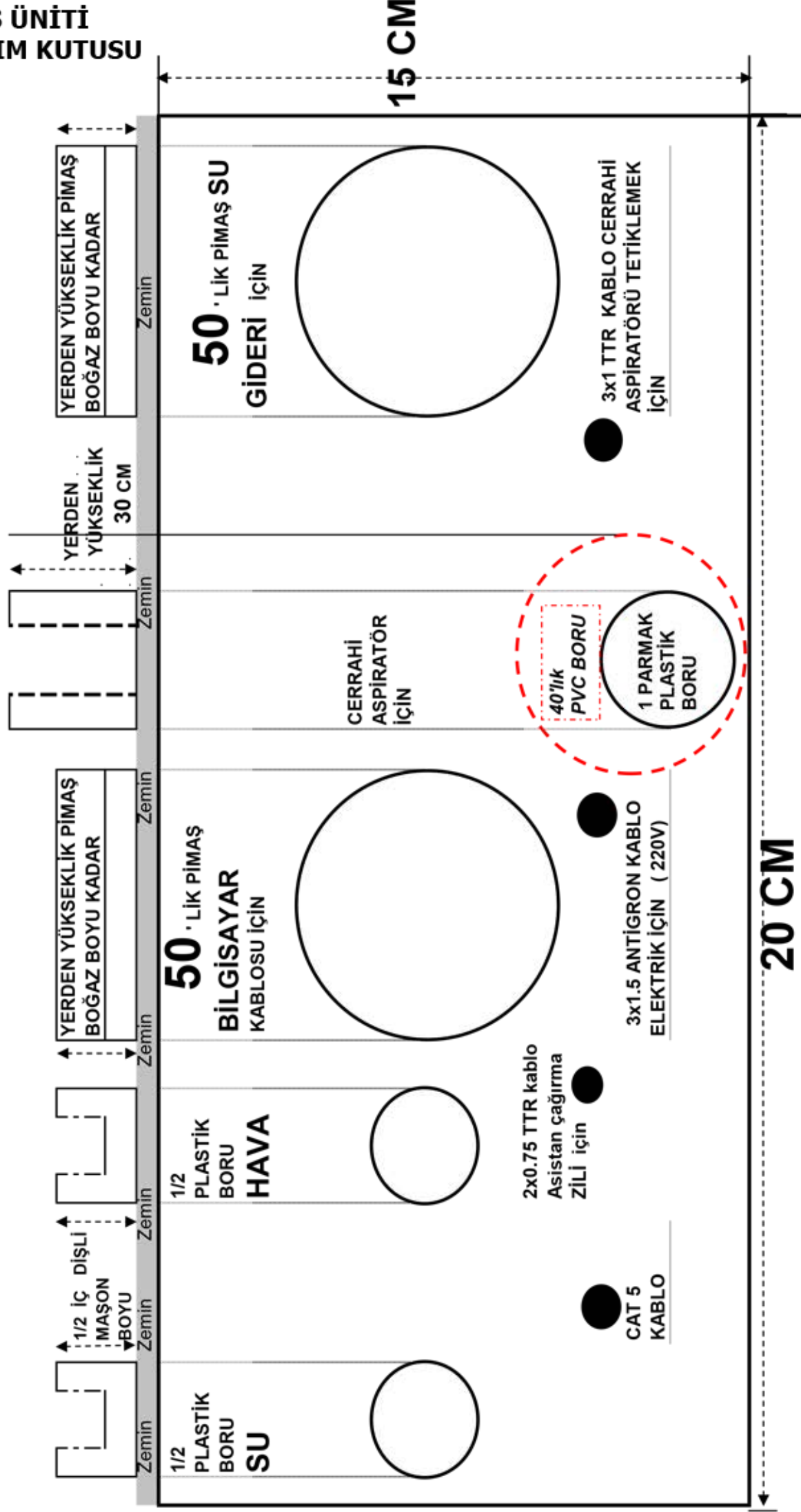


**KABLOLAR YERDEN 80 CM UZUN OLARAK BIRAKILACAKTIR**

**DİKKAT!!!** Cerrahi Aspiratör Sistemi Kullanılacak ise:

DÜRR Cerrahi Aspiratörde boru minimum 40'lıl PVC olmalı, CATTANI Cerrahi Aspiratörde boru minimum 1 Parmak Plastik Boru olmalı. Merkezi Aspiratör Sistemi uygulanacak ise lütfen TEKNİK SERVİS Merkezlerimize danışınız.

**CEFLA UNIT YER ŐEMASI**

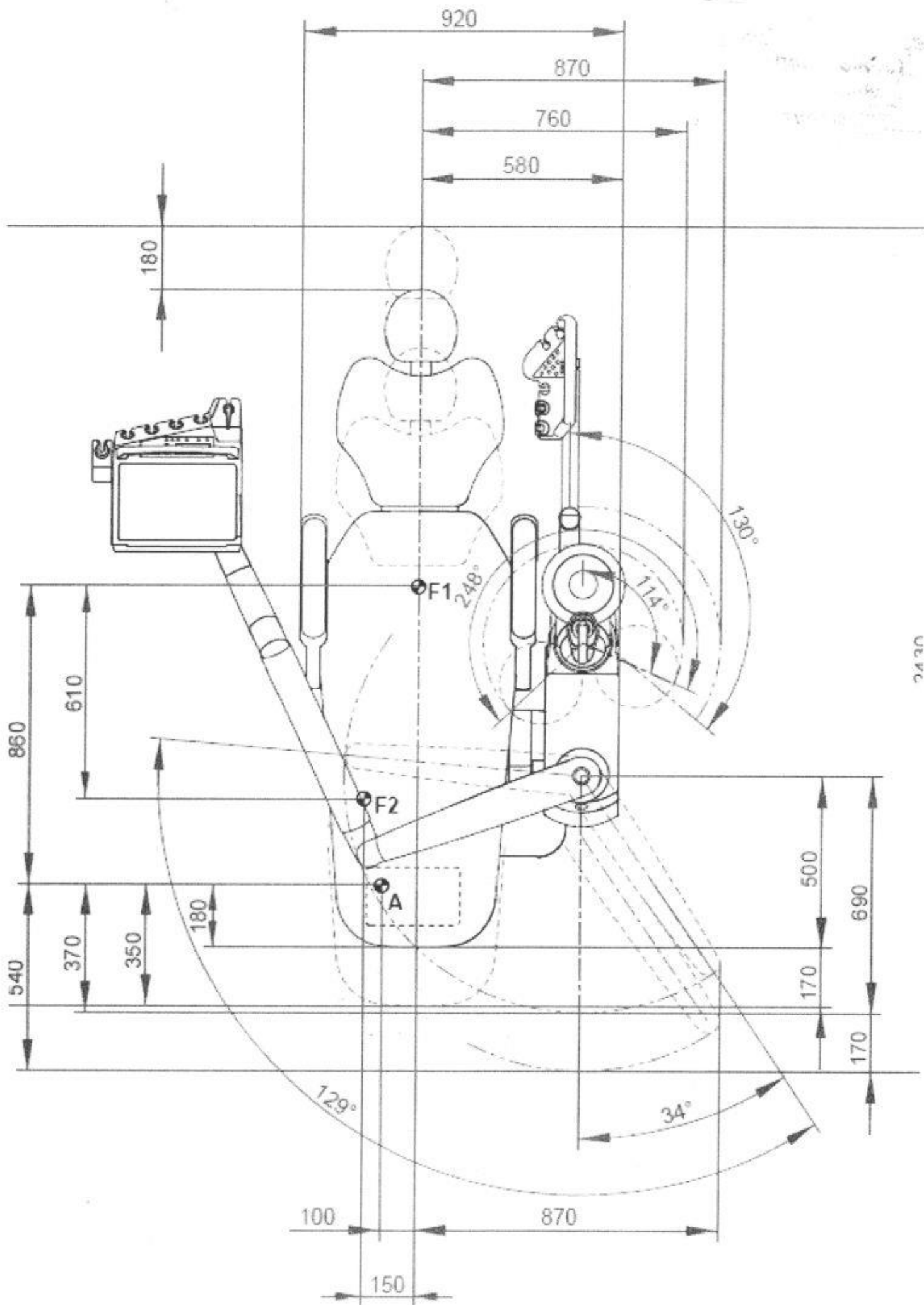

2430

# DİŞ ÜNİTİ ODA İÇİ YERLEŞİM ŞEMASI

