



## **DIŞ ÜNİTİ İÇİN YERLEŞİM BİLGİSİ**

Teknik servis tarafından verilen yerleşim dökümanı ekinde cihazın boyut ölçüleri ve dağıtım kutusu ayrıntısı verilmiştir. Diş ünيتين altında toplanacak olan boru ve kablo bileşenleri 15cm x 20 cm allanın dışına taşırılmayacaktır. Tesisat yapılırken teslim edilen dökümandaki açıklamaların dikkate alınması gereklidir.

- Rahat bir çalışma alanı oluşturmak açısından
- \* Ünit boyut ölçülerinin gösterildiği dökümanda belirtilen " A " noktasından (dağıtım kutusunun merkezinden) itibaren duvar/dolap arası 80 cm,
- \* cihazın kreşuar tarafından duvar/dolap arası minimum 110 cm,
- \* cihazın yatmış (trendelenburg) hali göz önünde bulundurulduğunda tetiyerden duvar/dolap arası minimum 60 cm mesafe bırakılması önerilir.
- \* Teslim edilen dökümanın ünit dağıtım kutusu ekinde belirtildiği şekilde 1/2 parmak plastik boruyla su getirilecek ve ucuna 1/2 parmak maşon takılacak.

## **CERRAHİ ASPIRATÖR İÇİN YERLEŞİM BİLGİSİ**

Teslim edilen dökümanın ünit dağıtım kutusu ekinde belirtildiği şekilde,


- Cerrahi aspiratörün konumlandırılacağı noktadan diş ünيتين altındaki dağıtım kutusuna,
- \* tetikleme için 3 x 1,5 TTR kablo,
- \* emiş için 40'lık PVC pimaş getirilmesi gerekmektedir. Birden fazla diş üniti varsa yakın noktaya kadar tek getirilip uygun yerden ünitlere dağıtım yapılabilir.
- \* Cerrahi aspiratörün konumlandırılacağı noktada 220V elektrik prizi olacak.

## **KOMPRESÖR İÇİN YERLEŞİM BİLGİSİ**

Teslim edilen dökümanın ünit dağıtım kutusu ekinde belirtildiği şekilde

- Kompresörün konumlandırılacağı noktadan diş ünيتين altındaki dağıtım kutusuna 1/2 parmak plastik boruyla hava getirilecek ve ucuna 1/2 parmak maşon takılacak. Birden fazla diş üniti varsa yakın noktaya kadar tek getirilip uygun yerden ünitlere dağıtım yapılabilir.

# ! DİKKAT ! : AŞAĞIDAKİ ŞEMANIN ÖLÇÜLERİ 1:1 DEĞİLDİR

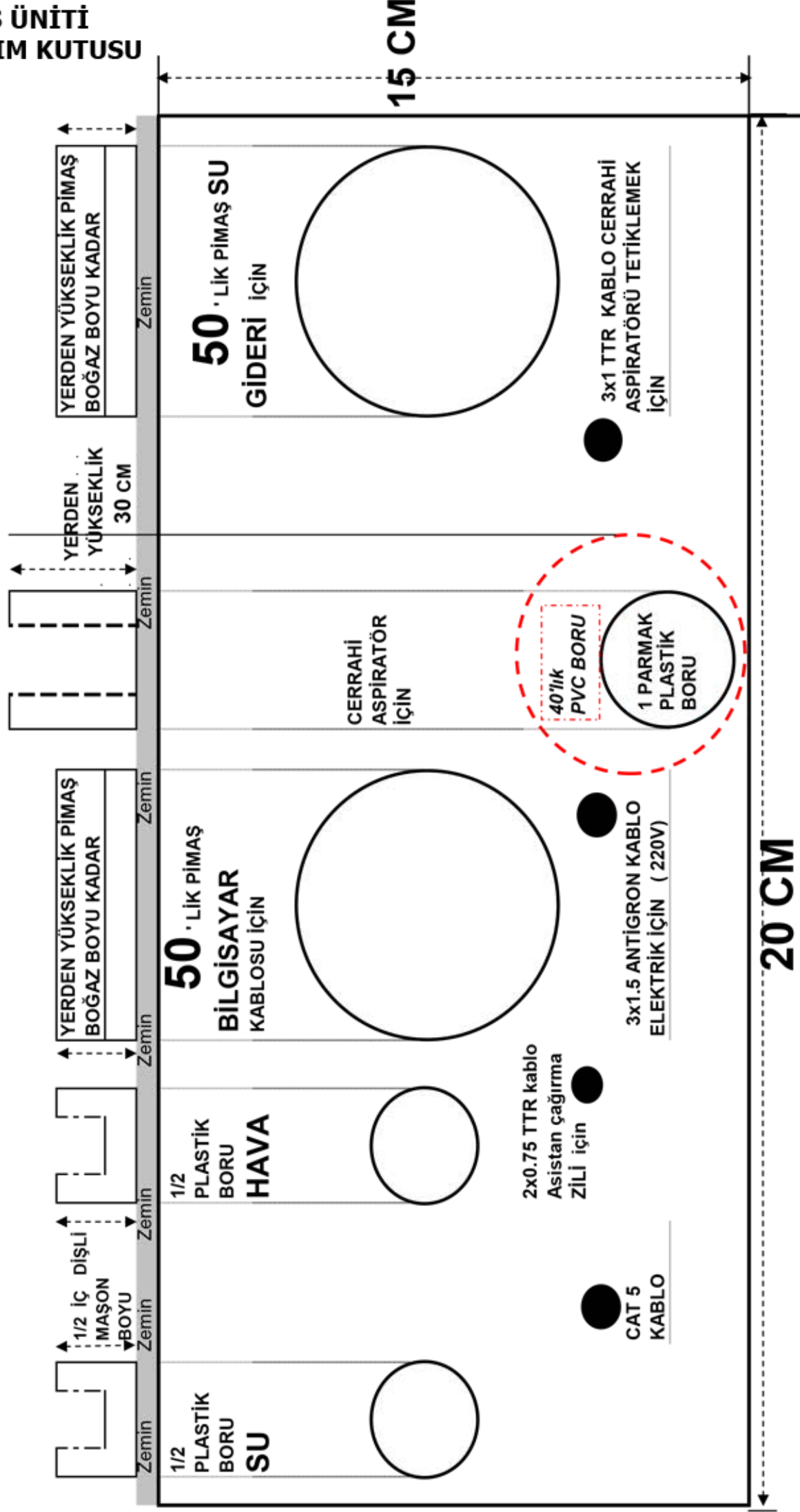


**KABLOLAR YERDEN 80 CM UZUN OLARAK BIRAKILACAKTIR**

**DİKKAT!!!** Cerrahi Aspiratör Sistemi Kullanılacak ise:

DÜRR Cerrahi Aspiratörde boru minimum 40'lıl PVC olmalı, CATTANI Cerrahi Aspiratörde boru minimum 1 Parmak Plastik Boru olmalı. Merkezi Aspiratör Sistemi uygulanacak ise lütfen TEKNİK SERVİS Merkezlerimize danışınız.

**CEFLA UNIT YER ŞEMASI**

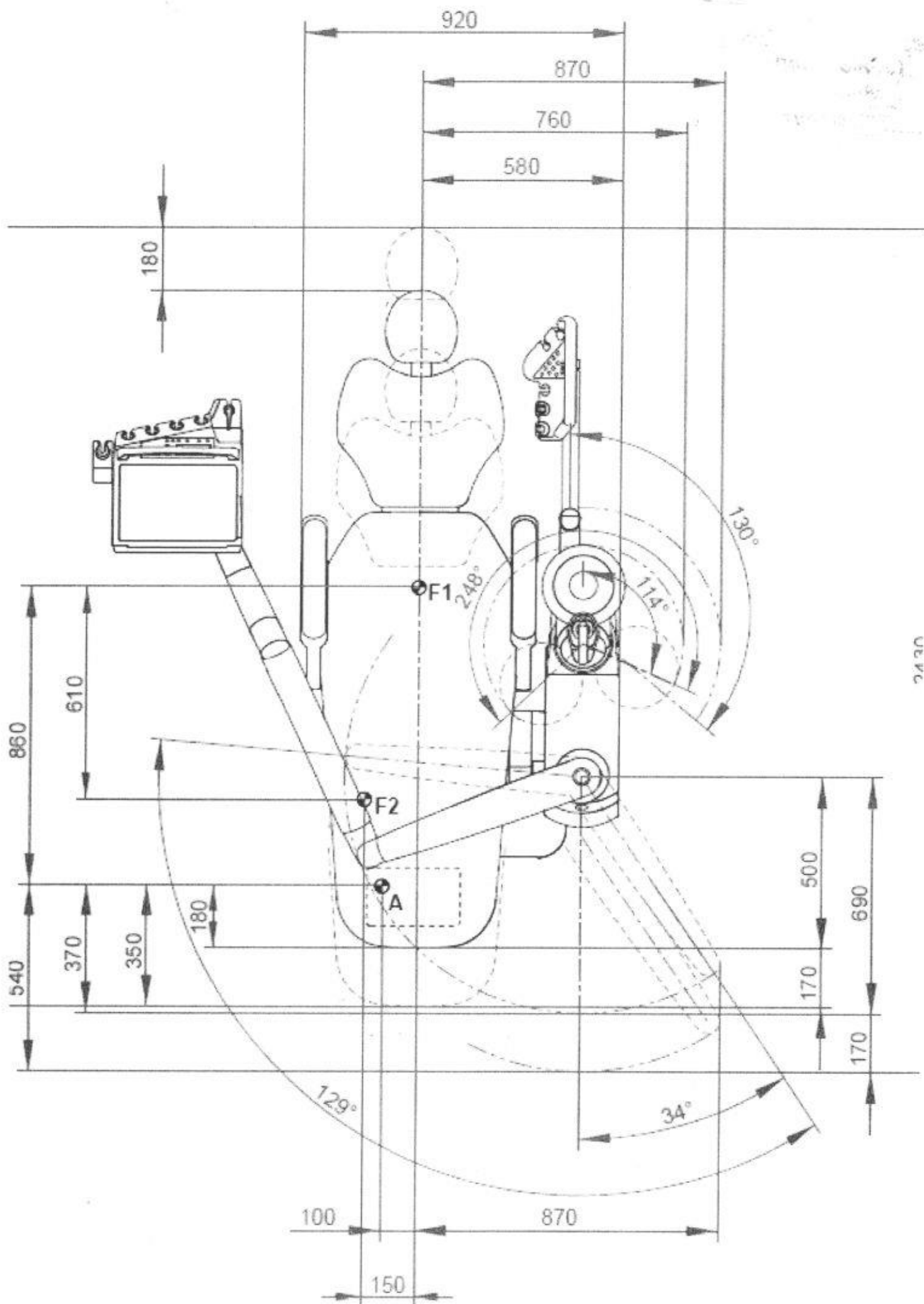

### DİŞ ÜNİTİ ODA İÇİ YERLEŞİM ŞEMASI

