



DİŞ ÜNİTİ İÇİN YERLEŞİM BİLGİSİ

Teknik servis tarafından verilen yerleşim dökümanı ekinde cihazın boyut ölçüleri ve dağıtım kutusu ayrıntısı verilmiştir. Diş ünitesinin altında toplanacak olan boru ve kablo bileşenleri 15 cm x 20 cm alanın dışına taşırılmayacaktır. Tesisat yapılırken teslim edilen dökümandaki açıklamaların dikkate alınması gereklidir.

- Rahat bir çalışma alanı oluşturmak açısından
- * Kreşuar tarafı için; ünit boyut ölçülerinin gösterildiği dökümanda belirtilen 'A' noktasından (dağıtım kutusu) itibaren dolap yoksa duvar, varsa dolap arası 130 cm,
- * Tetiyer tarafı için; cihazın sırtlık kısmı dikey pozisyonda , varsa dolap arası 150 cm olmalıdır.
- * Ayak tarafı için; ünit boyut ölçülerinin gösterildiği dökümanda belirtilen 'A' noktasından (dağıtım kutusu) itibaren dolap yoksa duvar, varsa dolap arası 130 cm mesafe bırakılması önerilir.
- * Teslim edilen dökümanın üniti dağıtım kutusu ekinde belirtildiği şekilde 1/2 parmak plastik boruyla su getirilecek ve ucuna 1/2 parmak maşon takılacak.



CASTELLINI MARKA DUVARA MONTE PERIAPICAL RONTGEN CİHAZI İÇİN YERLEŞİM BİLGİSİ

Periapical röntgen cihazının konumlandırılacağı duvar perde beton veya kolon olmalıdır. Röntgen cihazı tamamen açıldığında duvara 180 – 200 kg yük uyguladığından riskleri ortadan kaldırmak için montajın yapılacağı noktanın sağlamlığı önem arz etmektedir. Duvar montaj için uygun değilse uygun hale getirmek için metal konstrüksiyon yaptırılması gerekmektedir. Bu konuda teknik servise danışılmalıdır.


DURR MARKA CERRAHİ ASPİRATÖR CİHAZI İÇİN YERLEŞİM BİLGİSİ

Teslim edilen dökümanın ünit dağıtım kutusu ekinde belirtildiği şekilde, - Cerrahi aspiratörün konumlandırılacağı noktadan dış ünitenin altındaki dağıtım kutusuna, * tetikleme için 3 x 1,5 TTR kablo, * emiş için 40'lık PVC pimaş getirilmesi gerekmektedir. Birden fazla dış ünit varsa yakın noktaya kadar tek getirilip uygun yerden ünitlere dağıtım yapılabilir. * Cerrahi aspiratörün konumlandırılacağı noktada 220V elektrik prizi olacak.

DURR MARKA KOMPRESÖR CİHAZI İÇİN YERLEŞİM BİLGİSİ

Teslim edilen dökümanın ünit dağıtım kutusu ekinde belirtildiği şekilde - Kompresörün konumlandırılacağı noktadan dış ünitenin altındaki dağıtım kutusuna 1/2 parmak plastik boruyla hava getirilecek ve ucuna 1/2 parmak maşon takılacak. Birden fazla dış ünit varsa yakın noktaya kadar tek getirilip uygun yerden ünitlere dağıtım yapılabilir.

!!! DİKKAT !!! AŞAĞIDAKİ ŞEMANIN ÖLÇÜLERİ 1:1 DEĞİLDİR.

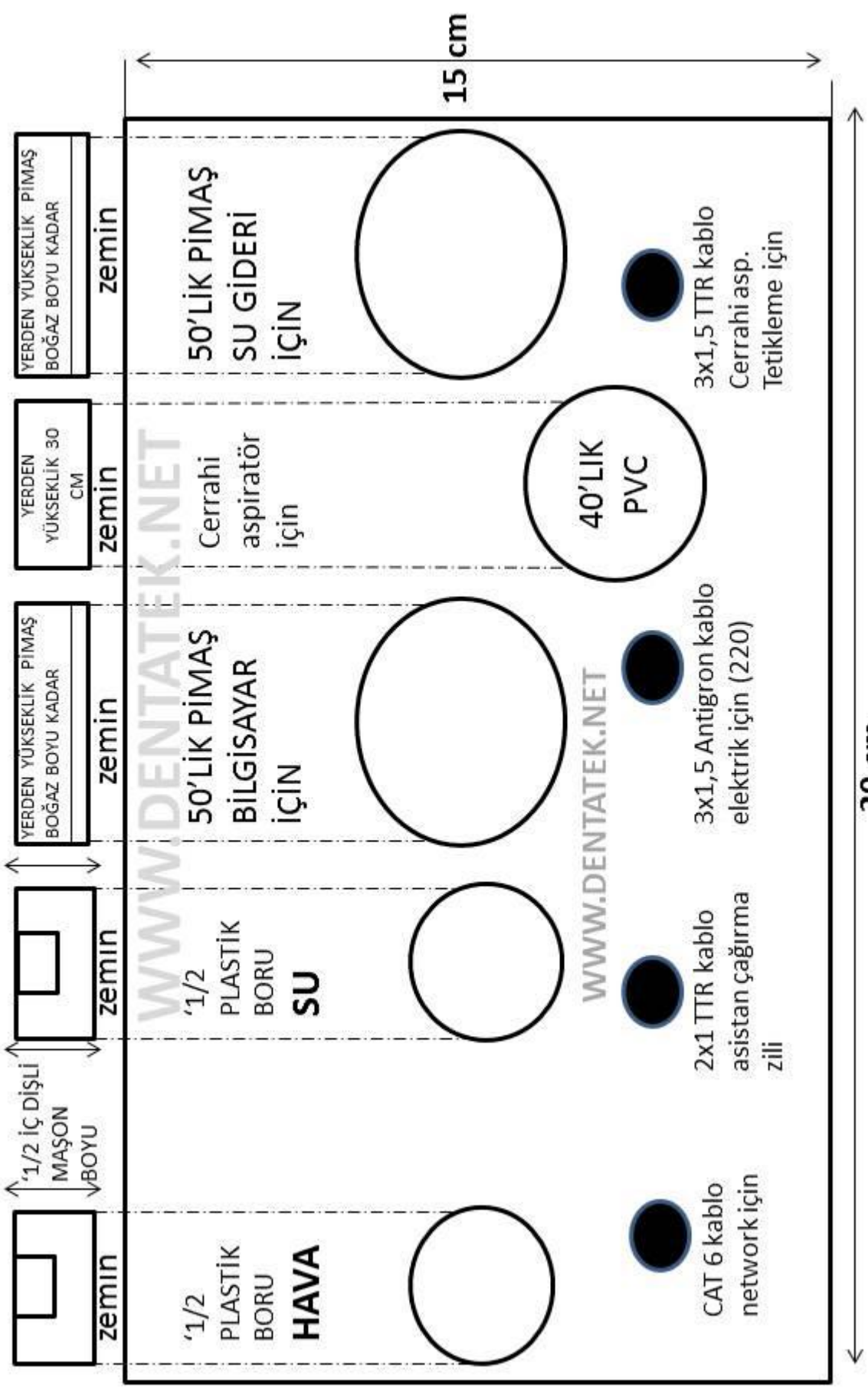

KABLOLAR YERDEN YÜKSEKLİĞİ 80 CM UZUN BIRAKILMALIDIR.

DİKKAT !!! Cerrahi aspiratör kullanılacak ise 40'lık pvc olmalıdır.

NOT: Merkezi sistem büyük aspiratör kullanılacak ise teknik servisten yardım talep ediniz.

CEFLA UNIT İÇİN UYGUNDUR.

DİŞ ÜNİTİ ODA İÇİ YERLEŞİM ŞEMASI

